

組別	表單	總院檢驗單是否開放於斗六分院採檢	檢驗單開放採檢，但下列項目 不開放 採檢，病人需到總院採檢	採檢注意事項	傳送條件	
外科病理組	8121	外科病理組織費用單	不開放			
細胞病理組	8122	細胞學檢驗單	不開放			
細胞遺傳組	8130	細胞遺傳檢驗單	開放	8130123 體液染色體不開放 8130025 腫瘤組織染色體不開放	冷藏傳送，需當天採、送達	
分子診斷組	8234	組織符合抗原檢驗單	開放	8234005 T Lymphocyte Crossmatch 8234006 B Lymphocyte Crossmatch *病人需到總院採檢	採檢後不離心，WBC<3000必須多抽一管	室溫傳送，需當天採、送達
	8290	癌症及基因分子診斷檢驗單	開放		採檢後不離心	室溫傳送，需當天採、送達
生化組	8211	自動化生化免疫檢驗單	開放	8211119 ICG 8211344 第一孕期唐氏症篩檢 8211346 第二孕期唐氏症篩檢(四指標) 8211364 基礎型非侵入性產前檢測 8211365 進階型非侵入性產前檢測	1. 紅蓋黃環管採檢後需離心 2. 8211316 RF請用紅頭管，採檢後需離心 3. 8211350 Vit B12、8211351 Folate、8211352 RBC Folate 需 空腹、避光 4. 8211355 Homocysteine、8211357 ACTH採檢後需 冰浴 傳送	1. 8211347 C3、8211348 C4、8211349 PTHi、8211350 Vit B12、8211351 Folate、8211355 Homocysteine、8211357 ACTH、8211363 phi (PSA+fPSA+p2PSA) 檢體Clot後馬上離心，檢體冷藏當天送達。 2. 紫頭管：8211352 RBC Folate、8211006 HbA1c、8211721 Cyclosporine、8211722 FK-506 Tacrolimus、8211723 Sirolimus (Rapamune)、8211724 Everolimus (Certican)不可冷凍不需離心，當天冷藏送達。 3. 除上述特殊處理項目外，其餘檢驗當天採檢離心當天冷藏送達。
	8212	特殊生化檢驗單	開放	8211137 代謝產物串聯質譜儀分析(自費) 8211141 代謝產物串聯質譜儀分析(健保：限小兒遺傳專科醫師) 8211150 Pompe Disease 8211151 Fabry Disease (限男生初篩) 8211152 Fabry Disease (限女性女生初篩或複檢及男生複檢) 8211154 Methylmalonic Acid 8211155 Amino acid analysis (quantitative) 8212048 Pyruvate 8211153 PCDF and PCBs 8211301 Methanol 8211302 Thiocyanide 8211303 Cyanide 8212304 Cholinesterase 8212305 Paraquat (blood, quantitative) 8212158 Gaucher disease screen 8212159 Gaucher disease GBA gene detection	1. 紅蓋黃環管及紅頭管採檢後需離心， 紅頭管請分裝 2. 8212078 LD EP檢體不可冷藏或冷凍 3. 8212080 Lipoprotein EP採檢前請先與總院生化組聯絡	除8212078 LD EP室溫傳送外，其餘當天採檢當天冷藏送達

組別	表單	總院檢驗單是否開放於斗六分院採檢	檢驗單開放採檢，但下列項目不開放採檢，病人需到總院採檢	採檢注意事項	傳送條件
生化組	8213	尿液體液生化檢驗單	開放 重金屬 8213503 Pb、8213504 As、8213505 Cd、8213506 Hg、8213507 Al、8213513 As、inorganic、8213514 Ni、8213515 Cr、8213516 Mn	1. 8213105 δ-ALA、8213106 Porphobilinogen需避光 2. 8213101 VMA、8213102 5-HIAA、8213104 17-OHCS、8213105 δ-ALA、8213106 PBG、8213109 CATE，需收集24小時尿液(添加10 mL 6N HCl處理)，採檢10mL尿液兩管並記錄24小時尿量於檢驗單。	室溫、需當天採當天送達
	8261	緊急生化檢驗單	開放 8261156 Ketone β-HB 8261150、8261151、8261121 Gas 8261124 CO *非血液類檢體，不開放	1. 採檢後需離心，紅頭管請分裝。 2. 灰頭管(Lac)與紫頭管(Amon)採檢後需冰浴傳送，離心後請分裝。	當天採檢當天冷藏送達
血液組	8221	一般血液檢驗單	開放 8221008 ESR 8221026 Betke Stain 8221033 RBC Fragility (RT) 8221034 RBC Fragility (incubation) 8221035 CD4 lymphocyte count panel *ESR:放太久結果會假性上升，故不開放	採檢後不離心	室溫 傳送，需當天送達； 若有人工DC，先製作一推片及一拉片。 RBC morp，先製作二片推片。 不接受隔日檢體
	8222	血液凝固因子檢驗單	開放 8222026 Bleeding Time (Ivy)	採檢後離心；以塑膠管分裝	若當日速達，冷藏傳送；若無法當日送達，需保存於冷凍(<-20°C)，並以冷凍傳送。
	8262	緊急血液檢驗單	開放 8262208 ESR *ESR:放太久結果會假性上升，故不開放	紫頭管：採檢後不離心 天藍頭管：採檢後離心，並以塑膠管分裝	紫頭管室溫傳送，需當天送達； 若有人工DC，先製作一推片及一拉片。不接受隔日檢體。 天藍頭管：若當日速達，冷藏傳送；若無法當日送達，需保存於冷凍(<-20°C)，並以冷凍傳送。
	8223	細胞標記檢驗單	不開放		
	8224	血液科特殊檢驗單	不開放		
	8265	體液檢驗單	不開放		
血清免疫組	8231	血清免疫檢驗單	開放 8231332 Screening of cryoprotein *需37°C保溫傳送並立刻處理，故不開放 8231388 latent tuberculosis infection (QuantiFERON) 8231432 ADAMTS-13 Activity *需2~8°C保溫傳送並立刻處理，故不開放	一般通則：單項最低檢體量3 mL，視項目多寡增加檢體量，採檢後離心。 例外項目：8231353 Cold hemagglutinin test未離心前請勿冷藏	開放項目當天或隔天送達均可 當天可送達：室溫或冷藏傳送 隔天送達：冷藏傳送

組別	表單	總院檢驗單是否開放於斗六分院採檢	檢驗單開放採檢，但下列項目 不開放 採檢，病人需到總院採檢	採檢注意事項	傳送條件
鏡檢組	8263	緊急尿糞檢驗單	不開放		
	8264	常規尿液檢驗單	不開放		
	8266	精液檢驗單	不開放		
	8267	常規糞便檢驗單	不開放		
微生物組	8240	細菌及黴菌培養檢驗報告單	開放	採檢需知及存放溫度請參考網頁或電話詢問總院	1. 需當天可傳送回總院檢體才收件 2. 培養基類請室溫傳送
病毒組	8236	病毒培養及快速診斷檢驗單	開放	<p>1. 一般檢體：2-8°C 冷藏傳送；血液類檢體請見以下第三點說明。</p> <p>2. 8236411、8236412、8236413 披衣菌／淋病雙球菌核酸檢驗項目：</p> <p>(1) 拭子檢體：請於採檢後，將專用採檢拭子置入BD MAX UVE 樣品緩衝液管內折斷，旋緊瓶蓋，再以2-8°C 冷藏傳送。</p> <p>(2) 尿液檢體：將尿液檢體進行Vortex至少 15秒以上，使用刻度滴管將約1mL 尿液移至BD MAX UVE 樣品緩衝液管，蓋上管蓋，上下倒置檢體管3-4次，確保檢體及試劑混合均勻，再以2-8°C 冷藏傳送。</p> <p>3. 血液類檢體請依規定時間傳送，不符規定則退件。</p> <p>(1) 8236101 病毒培養及鑑定、8236201 巨細胞病毒快速培養法之血液檢體（深綠頭管）以室溫傳送。</p> <p>*採檢當日送達病毒組，否則不予受理。</p> <p>(2) 病毒核酸檢驗之血液檢體（紫頭管/紅蓋黃環管）採集，需於6小時內完成血漿/血清之分離，以800 g (2000 rpm) 離心20分鐘，將血漿/血清分裝至康試管（至少1.5 mL），2-8°C 冷藏傳送。</p> <p>(3) 例外項目：8236812 HHV-6 PCR血液檢體不需離心，以全血2-8°C 冷藏傳送。</p>	需當天送達，冷藏傳送
血庫組	8257	血庫檢驗單	不開放		
	8250	備血單	不開放		